


Quickguide til udlæsning af data

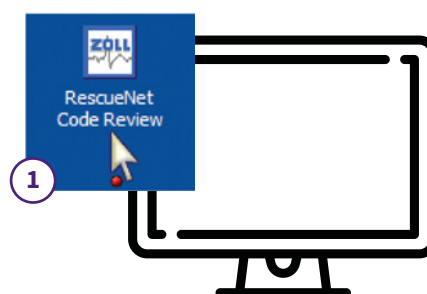


ZOLL AED 3 og AED 3 BLS hjertestarterer via USB

Nødvendigt udstyr

- PC med følgende programmer installeret:
 - RescueNet Code Review
 - Microsoft .Net Framework version 1.1 eller 2.0
- Tomt USB Stick



Vejledning

- 1) Åben programmet **RescueNet Code Review** på computeren.
Programmet åbner en tom side.
- 2) Tryk og hold **Tænd/Sluk knappen** nede på hjertestarteren i mindst 5 sekunder 
- 3) Tryk på ikonet for **konfiguration**  på hovedskærmen.
- 4) Sæt et tomt USB Stick i **USB-porten** bag på ZOLL AED 3 / BLS.
Vent på at USB-ikonet  vises nederst på skærmen.
- 5) Vælg en af følgende **muligheder** for kliniske patientjournaler:
 - a. **Kliniske data** – så overføres op til 2 patient cases
 - b. **Kliniske arkiver (ny)** – så overføres kun den nyeste patient case
- 6) Tryk på **'Gem (USB)'**.
- 7) Vent til **'Dataoverførsel Fuldført'** vises og tryk så **OK**.
- 8) Nu kan du åbne Patient casen(s) i RescueNet Code Review.

