



Quickguide til udlæsning af data

ZOLL AED Plus hjertestarter med infrarød port

Nødvendigt udstyr

PC med følgende programmer installeret:

- RescueNet Code Review (fra CD eller www.zolldata.com/rescuenet-code-review)
- Microsoft .Net Framework (fra Microsoft Update eller www.zolldata.com/c-r-downloads)
- Infrarød port på/fra computeren

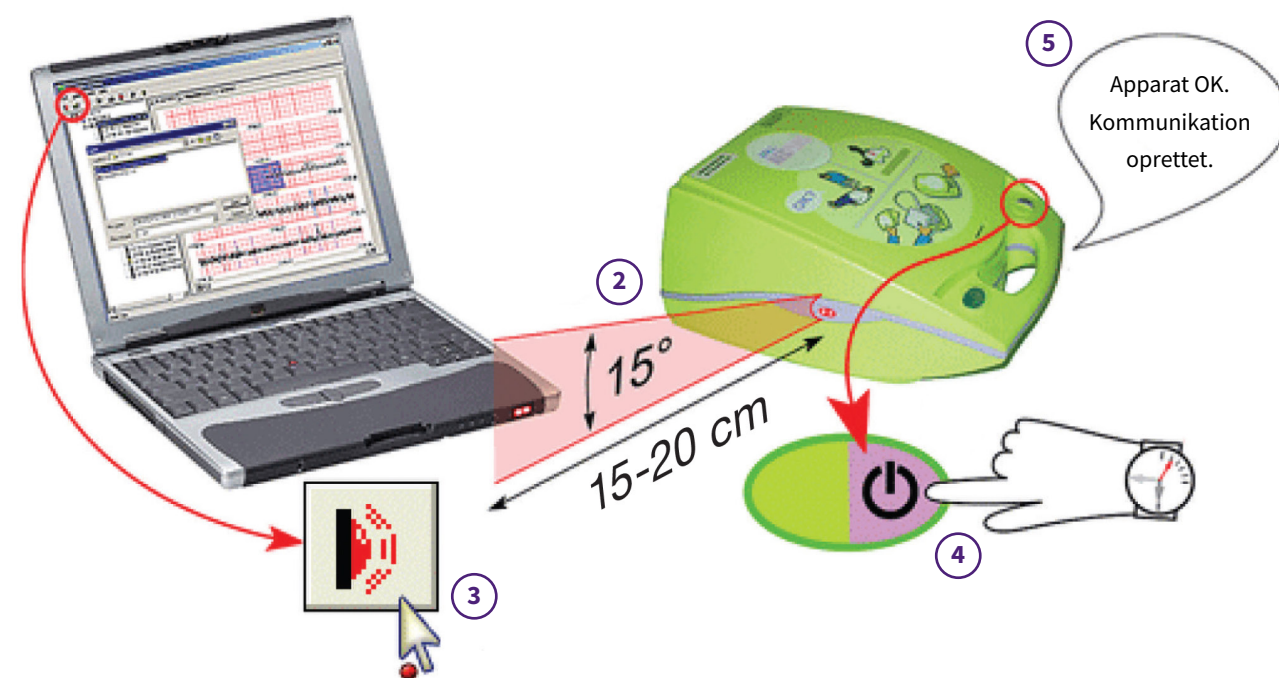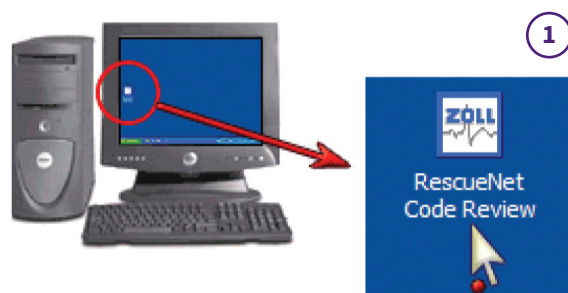

Vejledning

- 1) Åben programmet **RescueNet Code Review** på computeren. Programmet åbner en tom side.
- 2) Placér hjertestarteren, så den **infrarøde port** er på niveau med den infrarøde læser på computeren.
- 3) I programmet RescueNet Code Review klikkes på knappen: **Upload Case from Infrared**.
- 4) Hold **Tænd/Sluk knappen** på hjertestarteren nede i 7-8 sekunder.
- 5) Afvent at hjertestarteren siger: **Apparat OK. Kommunikation oprettet** - og slip herefter knappen.
- 6) I programmet **RescueNet Code Review** viser en dialogboks overførselsprocessen
- 7) Ønskes **data printet**, tryk på følgende: File - Print - Case - Stripes - OK