

Trin for trin

Opdateringsvejledning af software på ZOLL AED Plus hjertestarterer

Sørg for, at der er en infrarød (IrDA) port eller et USB kabel med IrDA tilgængelig/tilkoblet på PC'en.

1. Start med at downloade AED Plus software upgrade vers. 6.24 på www.hjertevagt.dk/produkt/zoll-aed-plus-hjertestarter/ (hvis du allerede har installeret et AED Plus Upgrade Wizard på din computer, skal du installere det to gange, da det i første omgang afinstallerer den gamle version)

2. Åben programmet "AED Plus Upgrade Wizard", der har lagt sig som et ikon på PC'ens skrivebord.

3. Placér PC'ens infrarød port op mod hjertestarterens infrarøde port (ca. 10-20 cm fra hinanden) og hold Tænd/Sluk-knappen på hjertestarteren nede i 7-10 sekunder. Der er etableret forbindelse mellem PC'en og hjertestarteren, når apparatet siger: "Kommunikation oprettet".

4. Vælg "ERC 2015 Guidelines" (vers. 6.24) i softwareprogrammet.

5. Tryk på "Next".

6. Følg vejledning fra programmet "AED Plus Upgrade Wizard".

Der overføres nu opdateret software til hjertestarteren. Efter nogle minutter skal hjertestarteren slukkes ved at trykke på Tænd/Sluk-knappen. Der kommer meddelelse herom nederst på siden i softwareprogrammet.

Herefter aktiveres hjertestarteren igen efter ca. 20 sekunder ved at holde Tænd/Sluk-knappen nede i 7-10 sekunder - stadigvæk med de infrarøde porte (IrDA) op mod hinanden.

7. Opdateringen er fuldført. Sluk for hjertestarteren.

Vælg "Next AED" i softwareprogrammet, hvis der skal opdateres flere hjertestartere.

